

ハンディ型 脂質測定装置 ポケットリピッド

わずかな血液で3項目同時測定可能。脂質異常症の予兆をモニタリング!

総コレステロール

中性脂肪

HDLコレステロール

グルコース付きカード
新登場!

測定項目
グルコース
中性脂肪
HDLコレステロール

ボタンひとつの
カンタン操作。



脳梗塞や心筋梗塞など、 生活習慣病の原因因子「脂質異常症」の兆候を、 また、「特定健診・特定保健指導」のツール として、血糖・脂質濃度を手軽にモニタリング。

脂質診断の新しいツールをご提供します。
脂質測定装置ポケットリピッドは、全血1滴を用いて、『カード1』で「グルコース濃度」「中性脂肪濃度」「HDLコレステロール濃度」を同時測定。
『カード2』で「総コレステロール濃度」「中性脂肪濃度」「HDLコレステロール濃度」を同時に測定します。またそれらの数値から、Friedewaldの演算式による「LDLコレステロール濃度」も算出します。
操作は、センサーをセットして、血液を点着したら、あとはスタートボタンを押すだけです。
測定時間は約3分30秒。
測定結果は、専用の外付けプリンター（オプション）にて印字することができます。
センサーカードは1回使い捨てで、交差感染を防ぎます。
患者様とのコミュニケーションツールとして、また保健指導のアイテムとして、ぜひご活用ください。

ハンディ型
コンパクトサイズ
なので、
持ち運びに便利。

赤外出力ポート
外部プリンタでの印字など、
外部機器とのデータ通信に
使用します

液晶ディスプレイ
操作手順、測定結果など
を表示します

簡単測定
ボタンを押す
だけの
カンタン操作。

センサーカード挿入口
センサーカードを挿入します


ボタン
測定スタート、印字、時刻
合わせ等の操作に使用します

迅速測定
測定時間は
わずか3分30秒。

とってもカンタン！ ポケットリピッドのはかり方



1 センサーカードを挿入し、電源を入れます。

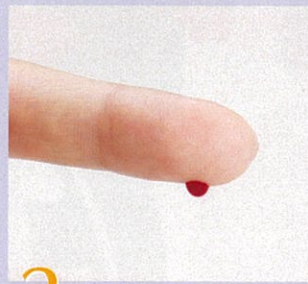

2 採血器具を使って、米粒大の血液を採ります。



3 センサーカードの導入口に点着します。



4 スタートボタンを押すと約3分30秒後に結果が表示されます。

仕様一覧

測定項目 / 演算項目	カード1：グルコース、中性脂肪、HDLコレステロール カード2：総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール（演算項目）
測定部 / 原理	使い捨てカード方式 / 酵素電極法
測定レンジ	総コレステロール :50~500 mg/dL 中性脂肪 :50~500 mg/dL HDLコレステロール :20~200 mg/dL グルコース :50~500 mg/dL
対応検体種	全血、血清、血漿
測定時間	約3分30秒（カード1は約3分55秒）
必要検体量	10μL以上
データメモリー	100回測定分
測定環境	温度:15~30℃ 湿度:30~80%
印字	外部プリンタ（別売）
出力	赤外出力ポート内蔵
寸法(mm)	170(H)×95(W)×50(D)
重量	360g（乾電池、ACアダプタは除く）
電源	専用ACアダプタ または 3Vリチウム電池×3
乾電池での連続測定回数	70回（Panasonic CR123A使用時）
装置の耐久性	20,000回測定 または 5年

- 外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- 一般医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称: コレステロール分析装置 分類コード:30855000
- 体外診断用医薬品
一般的名称: グラス1生化学検査用シリーズ 分類コード:80007001
コレステロールキット 分類コード:30159000
トリグリセライドキット 分類コード:30182000
HDLコレステロールキット 分類コード:30169000
血液検査用グルコースキット 分類コード:30167001



●ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。



●熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を中止し、お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

製造販売業者 / 販売業者

本カタログは、2010年1月現在のものです。

株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
http://www.TechnoMedica.co.jp E-mail pocketlipid@TechnoMedica.co.jp

お問い合わせなどは、こちらまで

フリーダイヤル 0120-0120-0120-41-8632 フリーダイヤル受付 9:00~17:00土日祝日除く