

小型採血管準備システム

# BC・ROBO-mini



採血管準備システムのニューフェイス  
BC・ROBO-mini

**TMC** Techno Medica



**超小型** **超低価格** **超シンプル**

# 採血業務の自動化がぐっと身近になりました。

BC・ROBOシリーズの実績と信頼から生まれた新世代採血管準備システムBC・ROBO-mini

## ◎コンパクト

設置場所を選ばない超小型デスクトップタイプ。(設置面積:445mm×430mm)

## ◎ローコスト

ラベルプリンタの価格に近く低価格を実現。

## ◎ネットワーク

上位のコンピュータからラベルプリンタを接続する感覚で簡単に制御可能。

## ◎スピーディー

大型採血管準備システムに匹敵する5秒/本の高速処理能力。

診療所で  
健診センターで

■診療所での運用例  
電子カルテシステムとの接続



■健診センターでの運用例  
連番ラベルの自動貼付セット



●採血管セットは安心・簡単なフロント操作方式を採用。

1管種20本、4管種まで対応可能。フロント操作方式を採用した採血管の補充は、動作中でも簡単・安全。収納部カバーを開けてキャップを手前に向け差し込むだけ。

中小病院で  
2人くらいで  
採血を行っている  
施設で

小型採血管準備システム  
BC・ROBO-mini 20



各病棟で  
大病院の  
各病棟で

●操作性に優れた大型ディスプレイ表示のタッチパネル方式。

A 1	B 2	C 1	D 1		
手貼 2	P 1	P 2	P 3	P 4	クリア

採血管を選択し本数を入力して下さい

取消 発行

オフライン発行(磁気カード診察券/2次元コード診察券)使用時の入力操作も簡単・確実。

■中小病院で磁気診察券を使用していない場合の運用例

2次元コードラベル発行装置

2次元コードリーダーで患者属性を読み取り入力

BC・ROBO-mini

■大病院の各病棟での運用例

中央採血室 BC・ROBO-787

院内LAN

採血業務の多い病棟  
上位コンピュータ -> パソコン -> BC・ROBO-mini

採血業務の少ない病棟  
上位コンピュータ -> ラベルプリンタ -> 採血管





## 小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 40

オプションで採血業務の効率化をサポートするトレイチェンジャーを装備。また、本体にセットできる手貼りラベル発行用の小型プリンタも用意しています。

手貼りプリンタ  
(オプション)



BC-458SR

### 仕様

適用採血管	径 : $\phi 12 \sim \phi 16.5\text{mm}$ 長さ : 75~100mm ゴム栓、フィルム栓、プラスチック栓、スピッツ
採血管供給部	4管種対応 1管種20本収納 (BC・ROBO-mini 20) 1管種40本収納 (BC・ROBO-mini 40)
処理能力	5秒/本 (連続発行時)
印字方式	ダイレクトサーマルのみ
印字の種類	バーコード : code128, code39, JAN, 2of5, NW-7 文字 : 英文字、数字、ひらがな、カタカナ、記号、漢字
ラベル	30×50、35×50、30×60mm 1500枚/巻
ラベル貼付け位置	手動にて任意に可変可能
データバッファ容量	8ラベル分データ取込み可能
インターフェース	RS232C
電気容量	100V、5A
外形寸法(mm)	445(W)×430(D)×555(H) (BC・ROBO-mini 20) 445(W)×430(D)×755(H) (BC・ROBO-mini 40) トレイチェンジャー 700(W)×210(D)×210(H)
重量	35 kg (BC・ROBO-mini 20) 40 kg (BC・ROBO-mini 40)
オプション	磁気カードリーダー、2次元コードリーダー、手貼りプリンタ、LAN I/F

●外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

本カタログは、2012年8月現在のものです。

**TMC 株式会社テクノメディカ** 本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962  
<http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850 名古屋市中区今池5-4-3 6F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801  
 福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334  
 札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760  
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334

北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192  
 甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017  
 広島営業所 〒731-0122 広島市安佐南区中筋2-3-4 1F TEL(082)830-5103 FAX(082)830-5104  
 松山営業所 〒790-0056 松山市土居町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871