



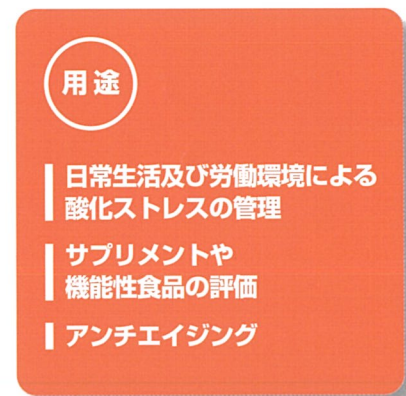

尿中酸化ストレスマーカー 測定システム

ICR-001

8-OHdG

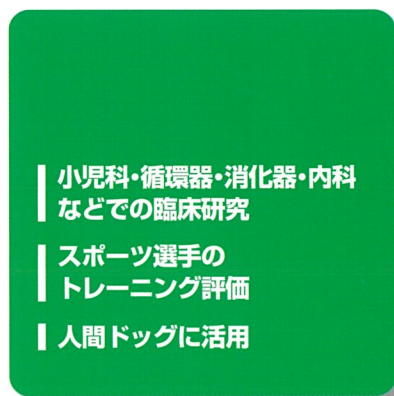

尿中酸化ストレスマーカーの「8-OHdG」を測定

簡単前処理、簡単操作でスピード測定



1 パソコン上でソフトを立ち上げます。



2 本体に測定カードをセットします。



3 検体滴下位置までテーブルを押し込みます。



4 各100μLの試料を滴下します。




5 テーブルを奥まで押し込みます。



6 約5分後に結果が表示されます。

一検体から測定可能だから
コストパフォーマンスに優れた
新開発測定カード

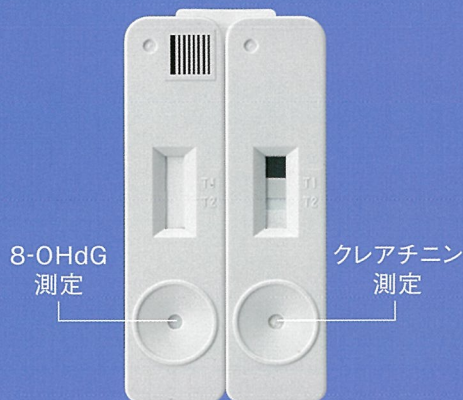

尿中酸化ストレスマーカー測定システム ICR-001 仕様一覧

● 本体		● 付属品(別売) 8-OHdG/クレアチニン測定カード	
測定対象	尿	測定原理	8-OHdG : イムノクロマト法 クレアチニン : Jaffe法
前処理	純水にて希釈(標準は2倍)	使用温度	18℃～30℃
測定項目	8-OHdG、クレアチニン	保管温度	室温(1℃～30℃) 凍結不可
演算項目	8-OHdG/クレアチニン比	添付品	パラメータ設定用USBメモリ
測定範囲	8-OHdG : 0.5～200ng/mL × 希釈倍率(2倍希釈時:1～400ng/mL) クレアチニン : 5～500mg/dL × 希釈倍率(2倍希釈時:10～1,000mg/dL) クレアチニン比 : 上記2項目の比で算出 単位 ng/mg CRE	荷姿	測定カード20枚入/箱
測定時間	約5分	8-OHdG : 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine	
サンプル量	8-OHdG : 100μL クレアチニン : 100μL		
使用環境	温度 : 18℃～30℃ 湿度 : 30%～80% 但し、結露しないこと		
寸法	150(W)×160(D)×170(H)mm		
重量	2.8kg		
電源	AC100V 50/60Hz 30VA		
添付品	解析ソフト(CD-ROM)、USBケーブル(2本)、ACアダプタ	一般的名称 : 尿化学分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器 分類コード : 35918000	
その他	本装置を制御するためのパソコン(Windows XP SP2以上)が必要です。 推奨性能 : CPU Celeron プロセッサ900(2GHz)、メモリ 2GB以上、 USB端子3つ以上、CD-ROM お手持ちのパソコンをお使いになる場合には、動作確認が必要です。		
オプション品	パソコン : 当社指定品 プリンタ : 当社指定品 ピペット : 100μL用 ピペットチップ : 100μL 96個入/ケース		

※本体とパソコンの接続にはUSBケーブルを2本使用します。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

●外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

本カタログは、2011年12月現在のものです。

製造販売業者/販売業者

TMC 株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市中区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850 名古屋市中千種区今池5-4-3 6F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517
大阪支店 〒564-0062 吹田市垂水町1-28-6 5F TEL(06)6337-3432 FAX(06)6337-3482
福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334

北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
甲信営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
広島営業所 〒731-0122 広島市安佐南区中筋2-3-4 1F TEL(082)830-5103 FAX(082)830-5104
松山営業所 〒790-0056 松山市土居町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871

